

end SPHÈRES®

THERAPY e la Microvibrazione Compressiva® Una tecnologia all'avanguardia per la bellezza femminile

L'endosphères therapy® o microvibrazione compressiva® è una metodica innovativa per la cura e il trattamento della cellulite. Studiata da anni nell'ambito medico universitario, essa rivoluziona il concetto fino ad oggi utilizzato di aspirazione e trazione dei tessuti. L'endosphères, infatti, sostituisce l'aspirazione con la compressione e la trazione con la vibrazione.

Il sistema permette di agire su tutti i tipi di cellulite, da quella edematosa a quella fibrosa, fino alla lipodistrofia in quanto il suo particolare meccanismo d'azione è stato sviluppato per svolgere in modo sinergico quattro differenti e fondamentali azioni:

- **linfatica**, perché la rotazione del cilindro determina un effetto pompa dei tessuti, favorendo lo svuotamento dei liquidi accumulati; infatti già dalla prima seduta la cliente dovrà effettuare la minzione avvertendo una immediata sensazione di leggerezza sulle gambe;
- **vascolare**, perché le pressioni e i sollevamenti sui tessuti innescano un processo vibratorio che riattiva la mi-

crocircolazione; infatti la cliente avvertirà un sensibile aumento termico sulle regioni trattate;

- **ricompattante**, perché la particolare modulazione di frequenza e la pressione del manipolo sui tessuti agiscono sulle fibrosità localizzate, svolgendo una vera e propria azione di disgregazione. Si ottiene così un rimodellamento tissutale ed uno straordinario effetto sulla buccia d'arancia, visibile ad occhio nudo dalla prima seduta. L'applicazione di questa tecnica in particolari zone del corpo, come le coulottes de cheval, tipiche conseguenze dell'ingrassamento femminile, da essere sostituiti di un trattamento chirurgico;

- **tonificante**, perché la vibrazione compressiva a bassa frequenza compresa tra i 127 e i 254 Hz con particolari tecniche applicative agisce sul muscolo determinando una riorganizzazione delle fibre e facendo in modo che il muscolo riacquisisca la sua fluidità funzionale.

Le tre azioni combinate - linfatica, va-

scolare, ricompattante- creano infatti una stimolazione del muscolo tale da apportare un'evidente tonificazione dei tessuti. L'effetto che si nota subito è infatti l'immediato sollevamento della natica. La sinergia delle azioni porta come risultato una evidente ed immediata tonificazione dei tessuti.

La tecnologia

Si tratta di un particolare tipo di vibrazione che si trasmette ai tessuti attraverso un cilindro ospitato in un manipolo in cui sono installate 55 sfere rotanti. La variazione della velocità del cilindro determina la frequenza (variabile da 40 a 254 Hz). Il senso di rotazione impiegata e la pressione fanno sì che i tessuti subiscano una compressione producendo un effetto 'pompa'. La giusta combinazione di queste forze determina l'intensità del trattamento, adattandolo alle condizioni cliniche del soggetto. Endosphères Therapy® è una tecnica non invasiva e rappresenta oggi un'importante soluzione per il trattamento delle varie forme di cellulite e non solo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Trattamento anticellulite

Questa particolare azione, costante e localizzata, del rullo sul derma favorisce la riduzione della buccia d'arancia e il contorno cutaneo si rimodella. Questa metodica avanzata risulta essere particolarmente efficace e sicura, in quanto non è invasiva.

Trattamento Viso

L'esperienza dell'Endosphères Therapy viene applicata anche per il trattamento delle rughe. Nuovi studi hanno dimostrato che cellulite e rughe hanno cause in comune come l'alterazione della matrice interstiziale e si possono quindi eliminare con la stessa tecnica, basata su semplici microvibrazioni compressive di sfere di silicone. Stessa tecnologia ma con uno strumento più piccolo e leggero, adatto a trattare parti delicate come il viso e il collo, portando risultati significativi a livello di ringiovanimento e distensione cutanea, con una riduzione dei più evidenti segni d'invecchiamento.

Trattamento seno

L'ultimo studio condotto dal Centro di Ricerca medica di Napoli 'Menesis', diretto dalla prof.ssa Bianca Diffidenti, e presentato in occasione del Sies - Congresso Internazionale di Medicina Estetica di Bologna - ha riportato gli effetti dell'applicazione della metodica Endosphères® sul seno. La ricerca ha dimostrato che applicando l'apparecchio in un ciclo di 6/8 sedute su seni anche maturi, si apporta una tonificazione e modellamento signifi-



FORO IN ALTO: PRIMA DEL TRATTAMENTO
FORO IN BASSO: DOPO 3 SEDUTE
AUMENTO DEL TONO MUSCOLARE
RIDUZIONE DELLE RUGHE DA MIMICA

cativi della mammella. Si è valutato, inoltre, che dopo 3 mesi dall'ultima applicazione il trattamento effettuato mantiene i suoi effetti. Attualmente questo trattamento rappresenta la migliore alternativa agli interventi di medicina estetica, certamente invasivi e con possibili effetti collaterali.

Punti di forza dell'Endosphères Therapy®

- È un trattamento non invasivo
- I risultati sono immediatamente visibili e duraturi
- È attestato da studi medico universitari
- È adatto al trattamento di tutto il corpo, compreso l'addome maschile

APPLICAZIONI



Numero Verde
800 136071

PRODOTTO E DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA DA:



www.fenixgroup.it GROUP

SCOPRI IL SEGRETO DI UN CORPO PERFETTO

DALL'ESPERIENZA BIOINGEGNERISTICA ITALIANA
NASCE **ENDOSPHERES THERAPY®**, LA NUOVA
RISPOSTA AL TRATTAMENTO DELLA CELLULITE.

MORBIDE SFERE DI SILICONE PER QUESTA
SOFISTICATA METODICA CAPACE DI RIMODELLARE
IL CONTORNO CUTANEO E RIDURRE LA BUCCIA
D'ARANCIA, SVELANDO LE LINEE SINUOSE DI UN
CORPO TONICO E LEVIGATO.

NUMEROSE RICERCHE IN CAMPO MEDICO
ATTESTANO GLI STRAORDINARI
RISULTATI DI ENDOSPHERES THERAPY:
EFFICACE, SICURA, NON INVASIVA.

**CHIEDI AL TUO
SPECIALISTA**

-2,5 cm RIDUZIONE DEL GIROCOSCIA, **2 TAGLIE IN MENO** DOPO I PRIMI TRATTAMENTI

MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA
**endOSPHERES®
THERAPY**

CHIAMA SUBITO

Numero Verde
800 136071

o visita il sito www.fenixgroup.it

